

MASCARA PROTECCION FACIAL ANTISALPICADURAS

NORMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION:

-Para la limpieza de la montura y pantalla de la máscara, deberá usarse agua y jabón, además de otros productos habituales de limpieza de material sanitario, la aplicación de dichos productos, se efectuará con **ELEMENTOS NO ABRASIVOS**, paño de algodón, papel absorbente, etc.).

-Para la esterilización de la montura y pantalla de la máscara, se procederá con los siguientes sistemas:



Esterilización con técnicas de procesamiento asépticas.



Esterilización con óxido de etileno.



Esterilización con radiación.

¡NO USAR SISTEMAS DE ESTERILIZACION POR CALOR HUMEDO O SECO!

