

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Máscara protectora facial antisalpicaduras VP1-20

Contenido por máscara

- 1x Diadema
- 1x Espuma
- 1x Pantalla
- 1x Goma tensora



1º Protecciones

Quitar las **laminas protectoras** de la pantalla por **ambos lados**.



2º Espuma

Colocar la **espuma adhesiva** por la parte interior de la diadema.



3º Montaje

Montar la **pantalla** introduciendo los resaltes de la diadema en los orificios realizados. Si es necesario, colocar también la **goma tensora** para una mayor sujeción.

Safety face shield VP1-20

CE (01) 8437021016994

SIHO medical devices



www.randrade.com